
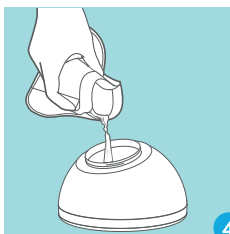
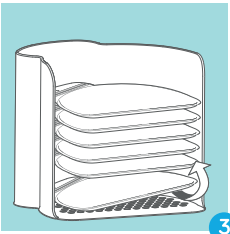


nanobébé

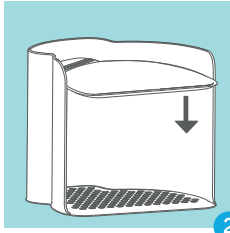

nanobébé

Zabezpiecz mleko z piersi przed rozlaniem i zepsuciem, dzięki innowacyjnym torebkom na mleko matki. Dzięki ich płaskiej budowie, torebki zapewniają szybsze chłodzenie mleka matki, co redukuje wzrost bakterii oraz szybsze rozmrażanie, co pomaga utrzymać wartości odżywcze mleka na dłużej.

Torebki są zrobione z bardzo wytrzymałego plastiku, dzięki czemu są trwałe i zapobiegają przeciekom, posiadają także podwójny zamek strunowy. Organizator pozwala na łatwe i higieniczne przechowywanie mleka, możesz łatwo zarządzać jego zapasami w myśl zasady "pierwsza włożona jako pierwsza wyciągana"

- Szybkie rozmrażanie pozwala na ochronę wartości odżywczych.
- Szybkie chłodzenie redukuje rozwój bakterii.
- Torebki rozmrażają się 2x szybciej niż standardowe torebki na mleko matki.
- Odporny na rozdarcie, bardzo wytrzymały plastik.
- Podwójny zamek strunowy pozwala na bezpieczne zamknięcie torebki.
- Miejsce do zapisania nazwy, objętości, daty i godziny.
- Organizator na torebki pozwala na łatwe zarządzanie zapasami mleka w myśl zasady „pierwsza włożona jako pierwsza wyciągana”.
- Wolne od BPA.

nanobébé



#### Więcej w ofercie nanobébé

**Elektryczna szczotka do czyszczenia**  
Ultraświetłowe wibracje dla dokładnego i łatwego czyszczenia.

**Mikrofalowy sterylizator parowy**  
Szybko eliminuje 99,9% bakterii.

**Smoczek uspokajający Flexy**  
Bardzo miękki, lekki o ergonomicznym kształcie smoczek uspokajający.

**Butelka na mleko matki**  
Opatentowany design chroni wartości odżywcze w mleku matki.

**Suszarka do butelek i smoczków**  
Szybkie, higieniczne suszenie butelek, można ją złożyć na płasko.

Made in China

PRODUCENT: Nutrits Ltd. POB 7239 Tel-Aviv, Israel 6107121

IMPORT I DYSTRYBUCJA: J.Musiół Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  
MARKO Spółka Jawna, ul. Markłowska 17, 44-300 Wodzisław Śląski,  
tel. 32 453 0171, [www.marko-baby.pl](http://www.marko-baby.pl) [www.nanobebe.pl](http://www.nanobebe.pl)

nanobébé

Ponieważ składniki odżywcze mają znaczenie

Torebki na mleko matki oraz organizator

#### SKŁADNIKI ODŻYWCZE

Równomierne rozmrażanie chroni składniki odżywcze mleka matki.

#### WYGODA

Bez przeciekania, bardzo wytrzymała struktura. Organizator dodatkowo chroni torebki w zamrażarce.

#### Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ze względu na ważne informacje.



ROZMRAZA SIĘ  
2 RAZY  
SZYBCIEJ

nanobébè

## Instrukcje przechowywania mleka matki

(nie dotyczy pokarmu dla dzieci przedwcześnie urodzonych)

miejsce	temperatura	czas przechowywania
temperatura pokojowa	19-26°C (66-78°F)	4-6 godzin
chłodziarka z woreczkami z lodem	15°C (59°F)	24 godziny
lodówka	<4°C (<39°F)	3-8 dni
zamrażarka	-18 - -15°C (0-4°F)	6-12 miesięcy

\*\* Aby dokładnie zmierzyć objętość pokarmu w torebce, utóż torebkę poziomo i przeczytaj objętość na skali.

nanobébè

## PRZECHOWYWANIE MLEKA

- Otwórz torebkę na mleko poprzez oderwanie zabezpieczenia i rozpięcie zamka strunowego.
- Wlej mleko z butelki do torebki, jeżeli używasz butelki do karmienia nanobébè, nałóż adapter do laktatora podczas wlewania mleka do torebki (rys. 1). Przed zapięciem zamka, lekko ściśnij torebkę, by pozbyć się powietrza ze środka torebki. Zapewni to świeżość pokarmu.
- Zapnij zamek. Upewnij się, że torebka jest poprawnie zamknięta przesuwając palcami wzdłuż zamka strunowego.
- Za pomocą długopisu lub markera wypisz dane na torebce - datę, godzinę odcięcia oraz objętość.
- Włóż torebkę do organizera jak pokazano na rysunku 2.
- Włóż organizer do zamrażarki.
- Jeżeli mleko wyleje się z torebki w zamrażarce, delikatnie wytrzyj torebkę za pomocą ręcznika papierowego.
- Upewnij się, że torebka jest sucha przed włożeniem jej do zamrażarki.

nanobébè

## ROZMRAŻANIE

- Wyciągnij torebkę z samego dołu organizera jak pokazano na rys. 3
- Włóż zamkniętą torebkę do czystego, pustego naczynia i umieść na 12 godzin w lodówce lub umieść zamkniętą torebkę w letniej wodzie na 30 minut. Mleko zacznie się osadzać, jest to normalny proces, ponieważ mleko matki nie jest homogenizowane.
- **Nie wkładaj torebki z pokarmem do wrzącej wody, mikrofalówki, nie kładź jej na płycie kuchennej.**
- Delikatnie zamieszaj mlekiem przed otwarciem, aby wymieszać tłuszcz, który się oddzielił.
- Przelej mleko to butelki nanobébè jak pokazano na rysunku 4. Nie napętniaj torebki ponownie.
- Podgrzej butelkę do karmienia do temperatury ciała wkładając ją do miski z ciepłą wodą lub używając pojemnika do butelek/torebek nanobébè.
- Nakarm dziecko natychmiast po podgrzaniu mleka.
- Wyrzuć plastikową torebkę do kosza na śmieci.
- Rozmrożone mleko, które nie jest podgrzane, może być przechowywane w lodówce przez 24 godziny.

nanobébè

## Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka

### OSTRZEŻENIE!

- **NIE ROZMRAŻAJ POKARMU W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ, NA PATELNI LUB WE WRZĄCEJ WODZIE, GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE WYROBU.**
- TYLKO DO UŻYTKU JEDNORAZOWEGO
- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.
- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnice. Próchnica zębów w dzieciństwie może wystąpić nawet jeśli pije się niestodzone napoje. Może ona wystąpić jeżeli dziecku pozwala się użytkować butelki/kubka przez dłuższy czas w dzień, a zwłaszcza w nocy, kiedy przepływ śliny jest ograniczony lub jeśli jest używany jako smoczek do uspokajania. Wszystkie części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dziecka.

### ZAWARTOŚĆ:

**Torebki na mleko matki oraz organizer**  
25 x jednorazowych, sterylnych torebek na mleko matki  
1 x organizer na torebki

**Torebki na mleko matki**  
50 x jednorazowych, sterylnych torebek na mleko matki

